

**ТОВ «ОЛИМП-МЕДСЕРВІС»**

04070, Україна, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 12а
ЄДРПОУ 38392512
Р/р UA723510050000026008501960800
в ПАТ "УкрСиббанк", м. Київ, МФО 351005
тел. +38 (044) 229-48-38
www.olympus.kiev.ua

ДОВІДКА**щодо питання про термін служби гнучких ендоскопів Olympus
і рекомендованих термінів сервісного обслуговування апаратури**

Підприємство-виробник не встановлює нормативів на ресурс ендоскопів в післягарантійний період. Це пояснюється тим, що термін служби окремих частин апаратів, як і ендоскопів в цілому, сильно залежить від умов експлуатації, а саме від техніки і методики застосування, щоденного навантаження і особливо від використовуваних на практиці процедур чищення, дезінфекції та стерилізації.

Разом з тим існують рекомендації з проведення обслуговування та ремонтів ендоскопів, які розроблені для широкого кола користувачів. Ці рекомендації ґрунтуються на досвіді проведення дрібних, крупних та капітальних ремонтів ендоскопів технічними службами компанії Olympus і надаються в припущенні повного дотримання вимог інструкції по експлуатації, середнього рівня навантаження (близько 10 процедур в день) і відсутності механічних пошкоджень. Таким чином, заміну слід проводити у такі терміни:

| № | Заміна витратних матеріалів та запасних частин | Рекомендації щодо терміну проведення ремонту | Рекомендації щодо терміну проведення ремонту по кількості | Категорія ремонту |
|---|--|--|---|-------------------------------------|
| 1 | Заміна гуми дистального кінця ендоскопа | Рекомендується проводити не рідше 1 разу на рік або по факту зносу гуми (потертість, перфорація) | Через 1000-1500 досліджень | Дрібний ремонт, група Е |
| 2 | Заміна секції дистального кінця, яка згинається, а також каналів і сорочки ендоскопа | Рекомендується проводити в середньому через 3-3.5 року | Через 3000-4000 досліджень | Крупний ремонт, група D або група С |
| 3 | Заміна дистальної головки | Рекомендується проводити за фактом виявлення несправностей цих | Через 4000-10000 досліджень | Капітальний ремонт, група В |
| 4 | Заміна оптоволоконних джгутів підсвічування і зображення | Рекомендується проводити за фактом виявлення несправностей цих | Через 4000-10000 досліджень | Капітальний ремонт, група А |

Слід зазначити, що ці дані є середньостатистичними і їх не слід розглядати в якості нормативів. При визначенні категорії ремонту ендоскопа і кожному окремому випадку необхідно враховувати реальну ступінь зносу вузлів і деталей апарату.

Провести безкоштовну діагностику і оцінити технічний стан вашого ендоскопа вам допоможуть фахівці сервісного центру з ремонту медичного ендоскопічного обладнання Olympus за адресою: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 12а, 2 пов., тел. +38 044 229 48 38.

З повагою,
Жуков Антон Ігорович
Директор сервісного центру